


Attends® Slip Active



Pukemishohje


Valmistelut

1

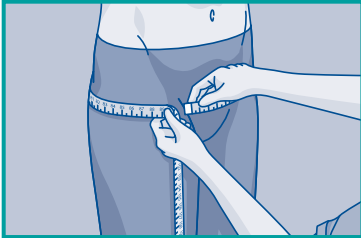


Tarvittaessa voi mitata lantion- ja vyötärön ympäryksen oikean koon varmistamiseksi.

2

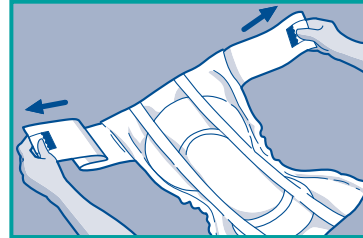

Avaa tuote ja aseta teippivyöt selkäpuolelle. Varmista, että vöiden taitokset on avattu kokonaan ennen vaipan pukemista. Varmista, että pehmeä, valkoinen sisäpinta tulee ihoa vasten.


3

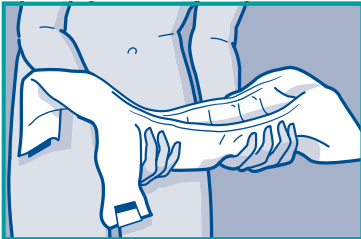

Taita vaippa pituussuunnassa kuppimaiseksi varmistaaksesi, että vuotosuojat kääntyvät ulospäin.

Pukeminen

4

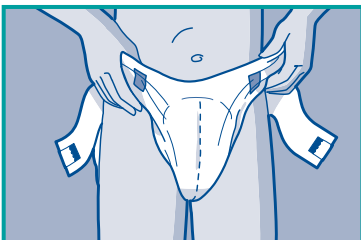


Taita teippivaippa kuppimaiseksi ja aseta se haarioihin niin, että se istuu hyvin nivusista. Käytä kosteusindikaattoria apuna vaipan keskittämisessä.

5



Vedä siivekkeet eteen ja käytä sivuilla olevaa sinistä tarraa apuna vaipan pukemisessa.

6

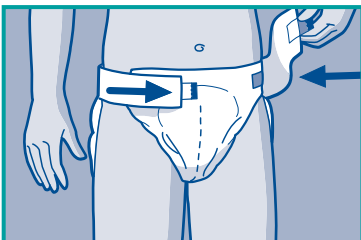


Kiinnitä siniset teipit napakasti vaipan vedenpitävään pintamateriaaliin.


Kun avaat teippejä, valkoinen teippiosa irroitetaan alustasta.

7


Käyttäjän kehon mallista riippuen kiinnitysvyöt asetettavat eri kohtiin:

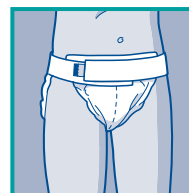

A. Päällekkäin

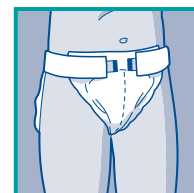

B. Vastakkain lähelle toisiaan

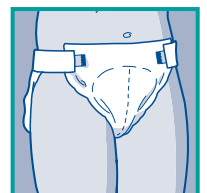

C. Sivuille lähelle vaipan reunaa

Vinkkejä ja neuvoja

Tuotevalikoima

- Valkoiset tuotteet ovat huomaamattomat.
- Siirry pienemmästä imukykyisarjasta paksumpaan teippivaippaan vasta, kun se on välttämätöntä. Varmista, että kyse ei ole pukemis-/kiinnitysongelmien aiheuttamista ohivuodoista.
- Tarvittaessa voit mitata lantion- ja vyötärön ympäryksen oikean koon varmistamiseksi.
- Teippivaipat ovat kiinnityksensä ansiosta hyvä vaihtoehto esim. muotovaipalle.

Vaihtaminen

- Tarkista kosteusindikaattori - jos siitä on hävinnyt yli puolet (60%), tulisi tuote vaihtaa. Muuten tuotetta voi vielä käyttää.
- Jos tuote on puhdas ja kuiva vessassa käynnin jälkeen, tuotetta voi käyttää edelleen.
- Sinisen kiinnitysalustan tulee pysyä aina kiinni vaipassa. Avaa vaippa vetämällä valkoisesta teipistä.
- Älä kiinnitä teippiä ihoon.
- Puhdista iho sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Puhdista edestä taaksepäin.
- Vältä öljypohjaisten ja jauhe-/talkkimaisten tuotteiden käyttöä vaipan kanssa, sillä ne vähentävät virtsan imeytymiskykyä.

Pukeminen

- Varmista, että lahkeensuiden joustavat resorit jäävät teippivaipan ulkopuolelle - näin vaipan ulkopinta ei ole kosketuksessa ihon kanssa.
- Teippivaippa on oikein päin, kun kiinnitysteipit ovat pukemista aloitettaessa selkäpuolella.
- Kiinnitä siivekkeet käyttäjän vartalotyypistä riippuen joko vyöksi tai alaviistoon.
- Jos siivekkeet menevät päällekkäin, teipit voidaan kiinnittää siivekkeiden päälle.
- Jos tuote puetaan käyttäjän ollessa makuulla, varmista vaipan paikallaanpysyminen tukemalla kädelläsi vaippaa selkäpuolelta, kun käännät potilasta.
- Käytä kosteusindikaattoria apuna asettellessasi vaippaa keskelle.

Ohivoto

- Tarkista vaipan hyvä istuvuus.
- Tarkista, että olet valinnut oikean vaippakoon.
- Siirry imukykyisempään tuotteeseen vain, jos olet varma, että kyse ei ole pukemis-/kiinnitysongelmien aiheuttamista ohivuodoista.

Hävittäminen

- Rullaa vaippa ja käsittele toimipisteesi kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä laita vaippa WC-pönttöön.

Attends Slip Active



Attends Slip Active - teippivaipat ovat proDERM-testattuja dermatologisen tutkimusinstituutin toimesta.

Lisätietoja saadaksenne, vierailkaa sivuillamme www.attends.fi